

Indications cliniques de l'extraction extracorporelle du CO₂



L'extraction extracorporelle du CO₂ (ECCO₂R) est une alternative ou un complément de la ventilation mécanique qui élimine directement le CO₂ du sang, ce qui permet de réduire le risque de lésion pulmonaire associée à une ventilation et de faciliter le repos, la protection et finalement la guérison des poumons.

BPCO


Corriger l'hypercapnie pour éviter une ventilation mécanique.

Envisager une ECCO₂R après 2 heures de ventilation non invasive si :

- pH < 7,25 et PaCO₂ > 55 mmHg (7,3 kPa)
- pH < 7,3 PaCO₂ > 55 mmHg (7,3 kPa) sans amélioration sous VNI
- Augmentation de la fréquence respiratoire
- Signes cliniques de fatigue des muscles respiratoires ou d'augmentation du travail ventilatoire
- Ventilation mécanique considérée comme indésirable

SDRA

Éviter les lésions pulmonaires induites par la ventilation.

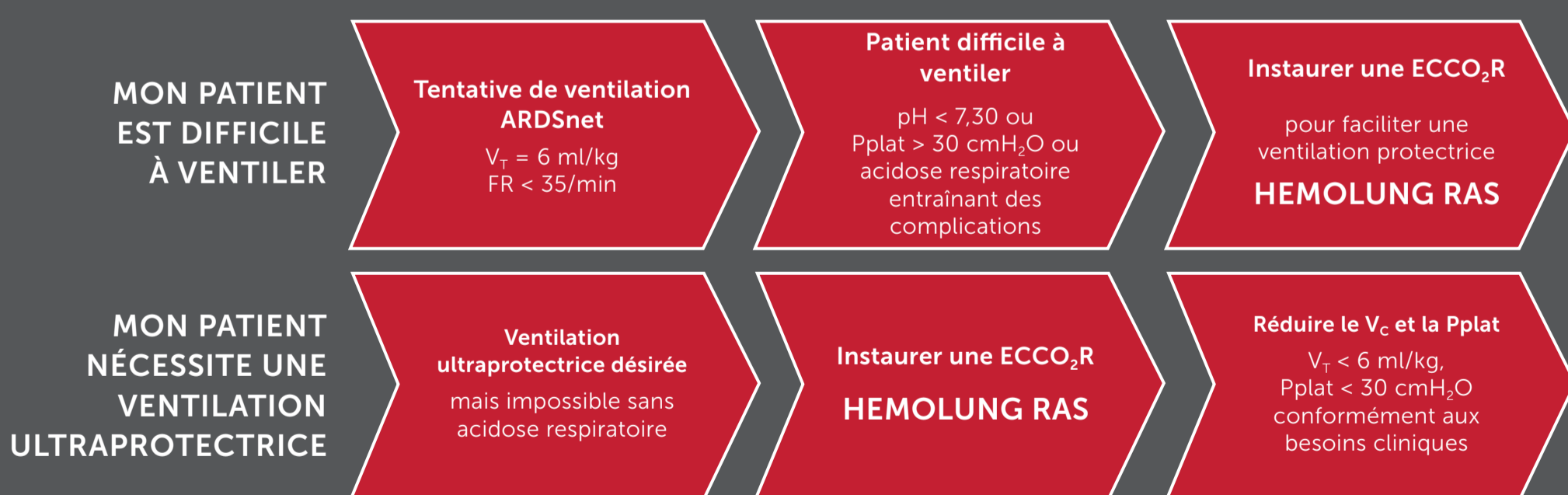

Des questions à propos de votre patient ?

Veuillez contacter l'assistance clinique ALung :

Allemagne : 0800-181-6344

France : 0800-918846

R.-U. : 0-808-189-1190

International : +1-724-506-5149

www.alung.com

HEMOLUNG RAS
Système d'extraction extracorporelle du CO₂

Développé par

ALUNG

Informations de sécurité importantes : Ce guide est fourni par Alung Technologies à des fins de formation des professionnels de santé sur l'ECCO₂R au moyen du système Hemolung RAS. Ces informations ne doivent pas être considérées comme complètes ou exactes ; elles ne doivent pas être considérées comme une recommandation de protocole de traitement pour un patient particulier. Ce document ne doit pas être interprété comme incluant toutes les méthodes de prise en charge adéquates ou excluant d'autres méthodes de prise en charge acceptables raisonnablement destinées à obtenir les mêmes résultats. La décision finale sur toute procédure ou traitement spécifique doit être prise par le médecin et le patient en tenant compte de toutes les spécificités de l'état du patient. **Indications (marquage UE/CE) :** Indications du système Hemolung RAS : 1) patients atteints de BPCO grave en échec de ventilation non invasive et pour lesquels il n'existe aucune alternative de traitement validée ; 2) administration de stratégies de ventilation pulmonaire protectrice chez les patients sous ventilation mécanique invasive. Le système Hemolung RAS n'est pas indiqué chez les patients ayant besoin d'assistance dans le cadre du sevrage d'une ventilation mécanique invasive, chez les patients atteints d'asthme grave ni chez les patients en phase pré ou post-transplantation pulmonaire. **Veillez consulter le Mode d'emploi du système Hemolung RAS pour la liste complète des avertissements, mises en garde et complications potentielles liées au traitement ECCO₂R.** Mise en garde : La loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif aux médecins ou sur prescription médicale. Interdit à la vente aux États-Unis.

© 2015 ALung Technologies | HL-PL-0325_RA